

## Indikationen von 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz

3M Cavilon Reizfreier Hautschutz schützt gesunde, gereizte und geschädigte Haut langanhaltend vor Irritationen und vermeidet Mazerationen und Reizungen.

### Er schützt:

- Vor Kontakt mit Körperflüssigkeiten im Intimbereich bei Harn- und Stuhlinkontinenz, in der Stomatherapie um Colo-, Ileo- und Urostoma (Listung im Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe Stoma)
- Vor Reizungen durch Flüssigkeit und Sekret um Tracheostoma, Drainagen und Fisteln
- Vor Kleb- und Reizstoffen (z. B. bei Pflastern und Verbänden) bei besonders empfindlicher und fragiler Haut
- Vor Nässe und Reibung bei Intertrigo in Hautfalten
- Die Haut und fixiert Markierungen in der Strahlentherapie<sup>1</sup>

3M Cavilon ist für Erwachsene, Kinder und Babys ab dem vollendeten 1. Lebensmonat geeignet.




Stoma



Drainagen



Irritierte, gereizte Haut

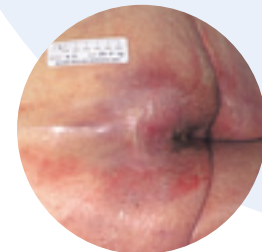

Von Inkontinenz angegriffene Haut



Tracheostoma

## Bestellinformationen

3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz ist im Rahmen der Stomatherapie im Hilfsmittelverzeichnis gelistet und kann budgetneutral verordnet werden.

3M Cavilon Reizfreier Hautschutz erhalten Sie auch rezeptfrei im Sanitätsfachhandel und in jeder Apotheke.

Best.-Nr.	Stück/ Packung	Hilfsmittelnummer/ Stomatherapie	Stück/ Bestelleinheit	PZN
<b>1 ml Schaumstoffapplikator</b>				
3343P	5	29.26.10.2013	20 x 5	6916728
3343E	25	29.26.10.2013	1	6916734
3343E/10	10	29.26.10.2013	1	6916711
<b>3 ml Schaumstoffapplikator</b>				
3345E	25	29.26.10.2013	1	6916740
<b>28 ml Sprayflasche</b>				
3346P	1	29.26.10.2014	12	6916757
3346E	12	29.26.10.2014	1	6916763

**Inhaltsstoffe:** Hexamethyldisiloxane, Polyphenylmethylsiloxane, Isooctan, Acrylat-Terpolymer

Zur Prophylaxe und Pflege intakter Haut empfehlen wir auch 3M Cavilon Langzeit-Hautschutz-Creme.



Hilfsmittelnummer:  
29.26.10.2013 und 29.26.10.2014

Vertrieb durch:



**Fresenius Kabi Deutschland GmbH**  
Kundenberatung  
61346 Bad Homburg  
Tel.: 0 61 72 / 6 86 - 82 00  
Fax: 0 61 72 / 6 86 - 82 39  
kundenberatung@fresenius-kabi.de  
www.fresenius-kabi.de

Diese Broschüre bitte nach Gebrauch recyceln.

3M, Coban, Medipore, Micropore und Tegaderm sind eingetragene Warenzeichen der Firma 3M.

© 3M 2012. All rights reserved.  
7309591/3 JR/VM 05/12

**3M**

**3M Medica**  
Zweigniederlassung der  
3M Deutschland GmbH  
Hammfelddamm 11  
41460 Neuss

## Professioneller Schutz vor Nässe & Reizstoffen

### 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz

- Einzigartige Acrylat-Terpolymer-Barriere
- Lang anhaltender Schutz intakter und geschädigter Haut



<sup>(1)</sup> Graham P., „Randomized, paired comparison of no-sting barrier film vs. sarbolene cream (10% glycerine) skin care during postmastectomy irradiation“, Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., Vol. 58, No 1, pp. 241-246, 2004

**3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz** ist ein klinisch geprüfter Hautschutz, der intakte, gereizte und geschädigte Haut zuverlässig bis zu 72 Stunden vor Flüssigkeiten und Reizstoffen schützt.

3M Cavilon Reizfreier Hautschutz ist ideal für die Stomatherapie und Inkontinenzbehandlung geeignet.

- Alkoholfrei, brennt nicht – auch auf schon gereizter Haut
- Schützt zuverlässig bis zu 72 Stunden
- Transparent und hauchdünn
- Atmungsaktiv und wasserfest
- Hypoallergen und nicht zytotoxisch



### Wie funktioniert 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz?

3M Cavilon Reizfreier Hautschutz ist eine Flüssigkeit, die auf die trockene, fettfreie Haut aufgetragen wird und in ca. 30 Sekunden zu einem atmungsaktiven und transparenten Hautschutzfilm trocknet.

3M Cavilon Reizfreier Hautschutz enthält keinen Alkohol. Reizfreie Lösungsmittel (Esther) halten 3M Cavilon Reizfreier Hautschutz in einer flüchtigen, homogenen Lösung. Diese verdunstet auf der Haut und hinterlässt einen hauchdünnen Acrylat-Terpolymer-Barrierofilm, der bis zu 72 Stunden einen zuverlässigen Schutz vor Flüssigkeiten und Reizstoffen bietet. Diese Barriere ist wasser- und seifenfest und bleibt auch bei Kontakt mit Stuhl, Urin und Sekreten erhalten.

Die gleichzeitige Verwendung von fetthaltigen Salben, Cremes oder Lotionen sollte vermieden werden, da dadurch der 3M Cavilon Schutzfilm entfernt und seine Wirksamkeit beeinträchtigt werden kann.

### Anwendung

- Die Haut reinigen und gründlich trocknen.
- 3M Cavilon Reizfreier Hautschutz gleichmäßig auf den gewünschten Bereich auftragen, das Spray dazu 10 bis 15 cm von der Haut entfernt halten.
- 30 bis 60 Sekunden trocknen lassen, Hautfalten bis zur vollständigen Trocknung auseinanderhalten.
- Maximal 2 Schichten 3M Cavilon Reizfreier Hautschutz übereinander auftragen.
- Nicht zusammen mit Cremes, Lotionen oder rückfettenden Waschlösungen verwenden.
- 3M Cavilon nur alle 2–3 Tage bzw. unter klebenden Verbänden bei jedem Verbandwechsel erneuern.

### Schaumstoffappikator:

Zum Einmalgebrauch für die lokale Applikation auf kleinen Arealen (Stoma- oder Drainagenumgebung). 1 ml reicht als Schutz für ca. 15 cm<sup>2</sup>, 3 ml für ca. 25 cm<sup>2</sup> Haut aus.



### Sprayflasche:

Ideal zum Schutz größerer Areale, z.B. des Gesäßes bei Inkontinenz.



### Hinweise

- Klebende Materialien (z. B. Basisplatten) haften hervorragend auf 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz.
- 3M Cavilon Reizfreier Hautschutz beeinträchtigt weder aufsaugende noch ableitende Inkontinenzhilfsmittel.
- 3M Cavilon Reizfreier Hautschutz muss nicht entfernt werden, da er sich mit dem körpereigenen Hautfett nach ca. 72 Stunden rückstandsfrei auflöst. 3M Cavilon kann auch mit öligen Substanzen oder den meisten medizinischen Klebstoffentfernern gelöst werden.

### 3M Cavilon Reizfreier Hautschutz sollte nicht angewendet werden

- Als einziger, mechanischer Schutz auf offenen Hautstellen und auf infizierter Haut (z. B. bei Pilzkrankungen)
- Unter EKG-Elektroden

Wirtschaftlich  
durch effektiven  
Langzeitschutz

Einzigartige  
Barrieretechnologie